

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

## レストアー リーマー(UCLA)

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔形状〕

リーマー(SD、RD、WD)



リーマーハンドル



#### 〔成分〕

高速度鋼、カーバイド

#### 〔原理〕

手動で本品を回転させることにより、メタルフレームのスクリー  
ーアクセスホール内のバリ等を除去する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる  
歯科技工用の器具である。

### 【使用方法等】

1. 適切なサイズのリーマーを選択する。
2. リーマーをリーマーハンドルへ挿入し、リーマーハンドル端の  
留め金を締めてリーマーを固定する。
3. リーマーをフレームのスクリーーアクセスホールに挿入し、リ  
ーマーがスクリーーの台座部に到達するまで時計回りに回転  
させてアクセスホール内面のバリ等を除去する。この作業を繰  
り返し、アクセスホールの内面を滑らかにする。
4. リーマーをスクリーーの台座部に到達させ、台座部に対してリ  
ーマーを軽く押し当てながら 2～3 回転させてスクリーーと  
台座部の適合面のバリ等を除去して滑らかにする。
5. エアでスクリーーアクセスホール内に残存している破片等  
を除去する。
6. 顕微鏡でスクリーーアクセスホール内面とスクリーー台座部  
面を観察し、突起や陥没がないことを確かめる。
7. スクリーーアクセスホールをスクリーーが貫通することを確認  
する。

#### 〔使用方法に関する使用上の注意〕

本品を使用の際には必ずインプラントのプラットフォームの  
サイズに対応する本品を選択すること。

### 【使用上の注意】

#### 〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあ  
たり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要  
領に関する Q&A について」別添 1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電 話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください