

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

レストアー スタンダードアバットメント アナログ

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔成分〕

ステンレス鋼

〔原理〕

本品は、スタンダードアバットメントと同一の形状を本品の先端に有しており、口腔内のアバットメントの形状と位置を模型上に正確に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. スタンダードアバットメントにインプレッションポストを装着し、インプラントが埋植された顎の全顎印象を採得する。
2. インプレッションポストへ本品を装着する。
〔クローズドトレー法により印象を採得した場合〕
アバットメントからインプレッションポストを撤去して本品と連結し、印象内に挿入する。
〔オープントレー法により印象を採得した場合〕
印象内のインプレッションポストに本品を装着し、同梱のインプレッションポストスクリューで固定する。
3. 印象に石膏又はエポキシレジンを注入・築盛して、作業用模型を作製する。（本品は作業用模型に組み込まれます）

【使用上の注意】＊

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：白水貿易株式会社

電 話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください