

機械器具 36 医療用ピンセット
ピンセット 35079001
一般医療機器


クランピング ツイーザ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本品は、ステンレス鋼製のピンセットである。

〔外観図〕

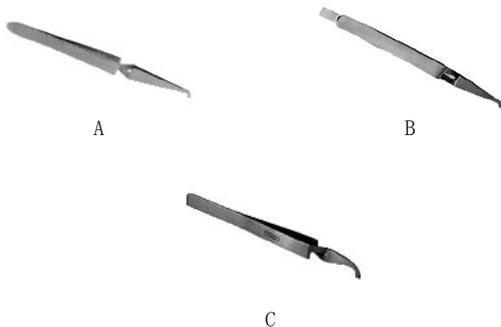

〔原理〕

先端部でブラケットを把持し、取り付ける。

【使用目的又は効果】

ブラケットを取り付けるために用いる。

【使用方法等】

先端部でブラケットを把持し、取り付ける。

【使用上の注意】**

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

〔重要な基本的注意〕

曲げ、切削等の形態変更(改造)は、破損等の原因となるので行わないこと。

【保守・点検に係る事項】**

1. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬し、除去する。
2. 汚染除去に用いる薬剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 洗浄装置(超音波洗浄器等)で洗浄するときには、洗浄物同士が接触して先端部を損傷することがないように注意する。
4. 洗浄後、本品は水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌(121℃、20分以上、又は135℃、3分以上)する。なお、滅菌バッグ包装を用いて滅菌するにあたっては、確実に滅菌できるよう滅菌条件を設定すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 白水貿易株式会社

製造国: ドイツ

製造業者: Dentaurum GmbH & Co. KG

販売業者: 株式会社デンタリード

電話番号: 06-6396-4448

FAX番号: 0120-24-0892

ホームページ: <https://www.dentalead.co.jp>