

グリック インストルメント 1

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔成分〕

ステンレス鋼

〔原理〕

圧接により歯科材料を充填します。

【使用目的又は効果】

歯科材料を根管に充填するために用いる。

【使用方法等】

本品の先端に根管充填材を取り、根管に圧接することにより充填を行う。

【使用上の注意】＊

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】＊

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 Premier Dental Products Company

製造国 アメリカ