

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

## ステージ1 インプラントアナログ

### 【形状・構造及び原理等】

[形状]



種類：RDS、WDS

[成分]

チタン合金

[原理]

アバットメントを本品に装着し、アバットメントを形成する際の支台として使用する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製する歯科技工用の器具として用いる。

### 【使用方法等】\*

1. 口腔内のインプラントのプラットフォーム径に合ったステージ1 カスタムプレップアバットメントを口腔内のインプラントに装着し、形成ラインをマーキング後、インプラントから撤去する。
2. インプラントのプラットフォーム径に合った本品を選択し、万力等の支持装置で支持する。
3. 形成ラインをマーキングしたアバットメントを本品に装着・締結し、カーバイドバー等で形成する。
4. 形成後、アバットメントを本品から撤去する。

[使用方法に関する使用上の注意]

使用するインプラントの種類に対応する本品を選択すること。

### 【使用上の注意】\*

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：[Keystone Dental, Inc.](http://www.keystone-dental.com)

取扱説明書を必ずご参照ください