

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

ステージ1 COCアバットメント アナログ

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



種類	色調	識別記号
RDS 4.0mm	紫色	A
RDS 5.5mm	緑色	B
RDS 7.0mm	青色	C
WDS 4.0mm	空色	D
WDS 5.5mm	黄色	E
WDS 7.0mm	無処理	F

〔成分〕

チタン合金

〔原理〕

本品は、ステージ1 COC アバットメントと同一の形状を本品の先端に有しており、口腔内のアバットメントの形状と位置を作業用模型上に正確に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製する歯科技工用の器具として用いる。

【使用方法等】*

1. ステージ1 クイックキャップのアバットメント嵌合部の平坦面と口腔内のステージ1 COC アバットメントの平坦面の位置を合わせて、クイックキャップを指圧によりアバットメントに装着し、適合を確認する。
2. クイックキャップを印象材で完全に覆い、印象を採得します。印象材硬化後にクイックキャップの入った印象を口腔内から撤去する。
3. 本品上部の平坦面と印象内のクイックキャップの平坦面の位置を合わせて本品をクイックキャップに装着し、適合を確認する。
4. 石膏を印象に注入し、石膏硬化後に石膏と本品から印象を撤去して作業用模型を作製する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

本品を使用の際には、必ずアバットメントと同色の本品を選択すること。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください