

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

エクспレス用コーピング

【形状・構造及び原理等】

[形状]



種類 : エンゲージ、ノンエンゲージ

【使用目的又は効果】

本品はエクспレスアバットメントに装着する上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 作業用模型上のエクспレスレプリカに本品を装着する。
2. 本品に直接ワックスアップする。
3. 通法にしたがって、スプルー植立・埋没・鋳造し、フレームを作製する。
4. 作製したフレームを元に、補綴物を作製する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製 造 販 売 業 者	白水貿易株式会社
製 造 国	スウェーデン
製 造 業 者	Neoss AB
販 売 業 者	株式会社デンタリード
電 話 番 号	06-6396-4448
F A X 番 号	0120-24-0892
ホ ー ム ペ ー ジ	https://www.dentalead.co.jp/

取扱説明書を必ずご参照ください