

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

ステージ 1 リーマー(C O C)

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



種類：RDS、WDS

〔成分〕

ステンレス鋼

〔原理〕

ハンドピースの回転によって本品を高速回転させることにより、
メタルフレーム内のバリ等を除去する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製する歯科技工用の
器具として用いる。

【使用方法等】*

1. センタリングピン先端部をメタルフレームに挿入します。単独
歯補綴物を作製する場合は、センタリングピン先端部の平坦面
をフレーム内の平坦面に合わせる。
2. ハンドピースにリーマーツールを装着する。
3. リーマーツールにセンタリングピンを連結する。
4. ハンドピースの回転数を 15,000rpm 以下に設定して回転させ、
センタリングピンをガイドとしてリーマーツールを軽く押し
ながらフレーム内の突起やバリ等を慎重に除去する。
5. フレーム内以外の部分のバリ等を除去してマージンを仕上げ
ます。基部の残りの部分を仕上げ、通法にしたがってポーセレ
ンを築盛する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. インプラントの種類に対応する本品を選択すること。
2. ハンドピースの回転数は 15,000rpm 以下で使用する。
3. 多数歯用連結補綴物を作製する場合は、メタルフレーム段階で
の試適を推奨する。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあ
たり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要
領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電 話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください