

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

ステージ1 インデックスアバットメント アナログ

【形状・構造及び原理等】

[形状]



種類	色調
RDS	青色
WDS	紫色

[成分]

チタン合金

[原理]

本品は、ステージ1インプラントのショルダー部及びインデックスアバットメントと同一の形状を本品の先端に有しており、口腔内のアバットメントの形状と位置を作業用模型上に正確に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製する歯科技工用の器具として用いる。

【使用方法等】

- インプラント上のインデックスアバットメントにインプレッションポストを装着し、インプラントが埋植された顎の全顎印象を採得する。
- インプレッションポストへ本品を装着する。
[クローズドトレー法により印象を採得した場合]
アバットメントからインプレッションポストを撤去してインプレッションポストスクリュー（ショート）で本品と連結固定し、印象内に挿入する。
[オープントレー法により印象を採得した場合]
印象内のインプレッションポストに本品を装着し、インプレッションポストスクリュー（ロング）で固定する。
- 石膏を印象に注入し、石膏硬化後に石膏と本品から印象を撤去して作業用模型を作製する。

[使用方法に関する使用上の注意]

本品を使用の際には必ずアバットメントの種類とサイズに対応した本品を選択すること。

【使用上の注意】*

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社
電話番号：06-6396-4400
FAX番号：06-6396-4457
ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製造国：アメリカ合衆国
製造業者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください