

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

ステージ1 COCアバットメント プラスチックスリーブ

【形状・構造及び原理等】

[形状]



種類：RDS ロッキング、RDS ノンロッキング、
WDS ロッキング、WDS ノンロッキング

[成分]

アセタール

[原理]

内部がアバットメント及びアナログと正確に嵌合する形状を有する本品を、作業模型上のアナログに装着してワックスを築盛し補綴物を作製することにより、アバットメントと正確に適合する形状を補綴物に転写する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製する歯科技工用の器具として用いる。

【使用方法等】

- 適切な種類の本品を選択し、作業用模型上のステージ1 COC アバットメントアナログに本品を指圧により被せる。
- ワックスアップを行う。必要に応じてラバーホイールで本品の上部をカットします。その後スリーブの残りの部分にワックスを築盛する。
- ワックスアップ後、ワックスアップしたフレームをアナログから取り外し、通法に従い焼却、鑄造を行う。
- フレームの掘り出し後、鑄造時に出来た微小なバリ等はフレームをアナログに装着する前にラバーホイールで除去する。
- 模型上のアナログにフレームを装着して適合を確認し、通法に従い、フレームを仕上げる。
- 作製したフレームをもとに、補綴物を作製する。

[使用方法に関する使用上の注意]

- 単独歯修復の場合はロッキング、多数歯修復の場合はノンロッキングの本品を使用すること。
- 必ずアバットメントのサイズに対応した本品を選択すること。

【使用上の注意】*

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください