

機械器具 62 歯科用切削器
歯科用エキスカベータ 35811000
一般医療機器

エキスカベーター

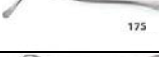
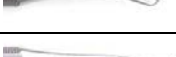
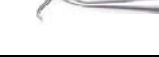
【形状・構造及び原理等】

[形状]



本品は、作業部（チップ）の形状により、46 種類の製品がある。

種類 12S、16S、17S、18S、24S、LS、1(C5)、3(C7)、5(C9)、6(C10)、
7(C11)、8(C13)、9(C14)、10(C15)、11(C16)、12(C17)、13(C18)、14(C19)、
15(C20)、16(C21)、17(C22)、18(C23)、24、25、123/124、125/126、127/128、
129/130、133/134、153/154、159/160、210/211、212/213、214/215、244、
245、5W、14W、17W、18W、19W、20W、31LS-スプーン、31L、32L、33L

	左チップ	右チップ
12S		
16S		
17S		
18S		
24S		
LS		
1(C5)		
3(C7)		
5(C9)		
6(C10)		
7(C11)		
8(C13)		
9(C14)		
10(C15)		
11(C16)		
12(C17)		
13(C18)		
14(C19)		
15(C20)		

	左チップ	右チップ
16(C21)		
17(C22)		
18(C23)		
24		
25		
123/124		
125/126		
127/128		
129/130		
133/134		
153/154		
159/160		
210/211		
212/213		
214/215		
244		
245		
5W		
14W		
17W		
18W		



	左チップ	右チップ
19W		
20W		
31LS- スプーン		
31L		
32L		
33L		

〔成分〕
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】
う歯の齲蝕象牙質除去のために用いる。

【使用方法等】
刃部を象牙質にあて、押圧により除去する。

【使用上の注意】＊
個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】＊
付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊
製造販売業者 白水貿易株式会社
電 話 番 号 06-6396-4400
F A X 番 号 06-6396-4457
ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 業 者 Premier Dental Products Company
製 造 国 アメリカ