

ノスティック インストルメント

【形状・構造及び原理等】

[形状]



種類

21B、ブラック 1/2、スパチュラ 24、CMI 1、CMI 2、CMI 3、CMI 4、CMI 5、CCI ミニ/スモール、CCI スモール/ミディアム、CCI ミディアム/ラージの 11 種類。

作業部

種類	左作業部	右作業部
21B		
ブラック 1/2		
スパチュラ 24		
CMI 1		
CMI 2		
CMI 3		
CMI 4		
CMI 5		
CCI ミニ/スモール		
CCI スモール/ミディアム		
CCI ミディアム/ラージ		

[成分]

アルミニウム

【使用目的又は効果】

歯科充填用コンポジットレジン¹⁾を歯牙に充填し、仕上げるために用いる。

【使用方法等】

本品の先端に歯科充填用コンポジットレジン¹⁾をとり、歯牙に圧接することにより充填を行う。また、本品の先端を充填した歯科充填用コンポジットレジン¹⁾に軽く打ちつけることにより、充填材料を形成する。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保守・点検に係る事項】*

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20 分以上、又は 135℃、3 分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話 番号 06-6396-4400

F A X 番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 Premier Dental Products Company

製造国 アメリカ