

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

Neo ラボ用スクリュー

【形状・構造及び原理等】

[形状]



種類:

Neo ラボ用スクリュー, NP

Neo ラボ用スクリュー, SP

Neo ラボ用スクリュー ロング, SP

[成分]

チタン合金

[原理]

作業用模型上のインプラントの模型に装着されたアバットメントを固定するために用いるスクリュー。

【使用目的又は効果】

本品は、ネオス インプラントに装着する上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 使用するアバットメントを作業用模型上のインプラントレブリカに装着する。
2. 本品をアバットメントのスクリューアクセスホールへ通し、専用のドライバーを用いて締結する。
3. 上部構造を作製する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. インプラント及びアバットメントに対応する本品を使用すること。
2. 上部構造の作製方法については、取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

製造国 スウェーデン

製造業者 Neoss AB

販売業者 株式会社デンタリード

電話番号 06-6396-4448

FAX 番号 0120-24-0892

ホームページ <https://www.dentalead.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください