

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

アクセス アバットメント（バーンアウト用）

【形状・構造及び原理】

〔形状〕



【使用目的又は効果】

本品は、ネオス インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器材である。

【使用方法等】

1. 作業用模型上のアクセスレプリカに本品を装着する。
2. 本品をアクセスプロセティックスクリューで締結し、アクセスレプリカに固定する。
3. 必要に応じて本品を形成する。
4. ワックスを築盛し、スプルー植立・埋没・鋳造を行い、フレームを作製する。
5. 作製したフレームを元に、補綴物を作製する。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社
製造国 スウェーデン
製造業者 Neoss AB
販売業者 ネオス・ジャパン株式会社
電話番号 03-5289-3511
FAX番号 03-5289-3512
ホームページ <https://www.neoss.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください