

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000
一般医療機器

再使用禁止

グラインディング ポイント

【禁忌・禁止】

再使用禁止

及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】 **

製造販売業者： 白水貿易株式会社
製 造 国： ドイツ
製 造 業 者： Dentaurum GmbH & Co. KG
販 売 業 者： 株式会社デンタリード
電 話 番 号： 06-6396-4448
F A X 番 号： 0120-24-0892
ホームページ： <https://www.dentalead.co.jp>

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本品は、アルミナ等を用いる技工用研削材である。

〔種類〕

1. グラインディング ポイント ブラウン
 - 1) シリンドリカル コース
 - 2) シリンドリカル ミディアム
 - 3) コニカル
 - 4) ホイール
 - 5) コンケイブ
 - 6) インバーテッド コニカル
2. グラインディング ポイント ピンク
 - 1) シリンドリカル 6.5mm
 - 2) シリンドリカル 5.0mm
 - 3) コニカル
 - 4) ホイール
3. アロキシシ ポイント
 - 1) シリンドリカル
 - 2) コニカル 3.5mm
 - 3) バド
 - 4) コニカル 2.5mm
4. プレグラインディング ポイント

〔原理〕

歯科用ハンドピース等に固定し、回転させることで歯科技工物を研削する。

【使用目的又は効果】

本品はアルミナ等を用いる技工用研削材で、歯科技工物を研削するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科用ハンドピース等に接続する。
2. 通法に従い、歯科技工物を研削する。
許容限界回転数：60000 回/分
（プレグラインディング ポイントのみ 30000 回/分）

【使用上の注意】 **

〔使用注意〕

1. 本品は指定の許容限界回転数を越えて使用しないこと。
2. 使用前に本品と歯科用ハンドピース等が確実に装着されていることを確認すること。
3. 本品を使用して研削する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
4. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

本品への曲げ、切削等の形態変更（改造）は、破損等の原因となるので行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】 **

〔保管方法〕

直射日光、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧