

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科用研磨器材 70907000
一般医療機器

ポリシング ブラシ

【形状・構造及び原理等】

【概要】

本品は、歯科用補綴物等の研磨に用いる。

【種類】

1. ポリシングブラシ 2列
許容限界回転数 6000 (回/分)
2. ポリシングブラシ 3列
許容限界回転数 6000 (回/分)
3. ポリシングブラシ 50mm
許容限界回転数 2800 (回/分)
4. ポリシングブラシ 80mm
許容限界回転数 1500 (回/分)
5. ポリシングブラシ ステンレス 70mm
許容限界回転数 5000 (回/分)
6. パラタル カップブラシ
許容限界回転数 3000 (回/分)
7. クロス ポリシングブラシ レーズ用
許容限界回転数 5000 (回/分)
8. レザー ポリシングブラシ
許容限界回転数 1500 (回/分)
9. クロス ポリシングブラシ ハンドピース用
許容限界回転数 5000 (回/分)
10. ポリシングブラシ ステンレス 21mm
許容限界回転数 5000 (回/分)
11. ポリシングブラシ 21mm
許容限界回転数 5000 (回/分)
12. ポイントブラシ
許容限界回転数 10000 (回/分)

【原理】

歯科用マンドレル、歯科用ハンドピース又は、歯科用レーズ等に接続し、回転させることで歯科用補綴物を研磨する。

【使用目的又は効果】

本品は歯科用補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科用マンドレル、歯科用ハンドピース又は、歯科用レーズ等に接続する。
2. 通法に従い、歯科技工物を研磨する。

【使用上の注意】**

【使用注意】

1. 本品は指定の許容限界回転数を越えて使用しないこと。
2. 使用前に本品と歯科用マンドレル、歯科用レーズ等が確実に装着されていることを確認すること。
3. 本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
4. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)
平成26年10月31日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【重要な基本的注意】

本品への曲げ、切削等の形態変更（改造）は、破損等の原因となるので行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

直射日光、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： 白水貿易株式会社
製造国： ドイツ
製造業者： Dentaurum GmbH & Co. KG
販売業者： 株式会社デンタリード
電話番号： 06-6396-4448
FAX番号： 0120-24-0892
ホームページ： <https://www.dentalead.co.jp>