

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

## プロセスリング

### 【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔成分〕

シリコーン

〔原理〕

義歯床作製時、義歯床側に組み込まれるリングキーパーをリングアパットメントのボール部に保持して義歯床内の位置を定める。

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる  
歯科技工用の器具・材料である。

### 【使用方法等】

1. 本品をリングキーパーに装填し、リングキーパーを作業模型上のリングアパットメントのボール部に装着する。
2. リングキーパーとアパットメントの界面をブロックアウトする。
3. ワックスデンチャーを模型に装着して埋没・脱蠟を行います。脱蠟によって生じた空隙に床用レジンを填入して重合させることでリングキーパーを義歯床に組み込み、義歯床を模型から撤去する。
4. 義歯床内のリングキーパーから本品を撤去する。

### 【使用上の注意】\*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。  
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

F A X 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください