

再使用禁止

オートミックスチップ

【禁忌・禁止】*

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕



〔成分〕

プラスチック

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料を練和する器具であり、練和並びに注入に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. シリンジのキャップを 90 度回転させて取り外す。
2. シリンジのプランジヤーを押してペーストを豆粒大程度押し出す。押し出されたペーストは破棄する。
3. 本品のハブとシリンジの V 字型の切り込みが合うように本品を取り付ける。ロックされるまで 90 度回転させる。
4. 使用前にペーストを押し出して確認する。その後、歯に直接押し出す。
5. 使用後は本品を取り外し、キャップを再装着する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

本品が確実に装着されていることを確認してから、使用すること。

【使用上の注意】*

1. 本品に適合しないシリンジに使用しないこと。
2. 樹脂に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
3. 樹脂に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本品を使用しないこと。
4. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電 話 番 号 06-6396-4400

F A X 番 号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 業 者 Premier Dental Products Company

製 造 国 アメリカ