

**2021年2月改訂（第5版）

届出番号：27B1X00020223044

*2016年7月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

機械器具 42 医療用剥離子
歯科用起子及び剥離子 70683000
一般医療機器

LM リフトアウト

【形状・構造及び原理等】*

[概要]

本品は、作業部、把部からなるてこ形状の器具である。

[形状]



種類	作業部
S2 ストレート LM 812220	
S3 ストレート LM 812230	
S4 ストレート LM 812240	
S5 ストレート LM 812250	
C3 カーブ LM 812430	
C4 カーブ LM 812440	
C5 カーブ LM 812450	

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離に用いる。

【使用方法等】

歯と歯根膜の間に挿入し、歯根尖に向かってゆっくりと器具を上
下左右に動かし、靭帯を切断する。

【使用上の注意】*

[重要な基本的注意]

エレベーターとしての使用はしないこと。

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、
既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れ
てオートクレーブ滅菌(134℃、2bar、3分以上)を行う。

高圧アルコール蒸気滅菌器による滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド