

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯面研磨材 70904000
一般医療機器

エアNゴー パウダー クラシック

スティックタイプは単回使用

【禁忌・禁止】**

- 次に該当する患者には使用しないこと。
心内膜炎、免疫欠損、抗生剤服用中、化学療法による治療中、放射線治療中、糖尿病、妊娠中、授乳中、喘息、慢性気管支炎、ナトリウム摂取制限を必要とする患者、その他の呼吸器疾患
- サテレック社製以外の能動型機器接続歯面清掃用機器には使用しないこと。
- 使用中は必ず、パキュームを併用すること。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

- ・ボトルタイプ(250g)

ニュートラル、ペパーミント、レモン、ラズベリー、コーラ



- ・スティックタイプ(20g 50 本入り)

ニュートラル、ペパーミント、レモン、ラズベリー、コーラ



〔成分〕

炭酸水素ナトリウム、シリカ、サッカリンナトリウム 他

〔原理〕

能動型機器接続歯面清掃用機器を用い、本品を歯に噴射する。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

- 能動型機器接続歯面清掃用機器のタンクに、粉末を入れる。
- 能動型機器接続歯面清掃用機器のノズルを歯面に向ける。
歯面とノズルの距離は、3-5mm 程度。
歯面とノズルとの角度は、35-60 度。
- 歯面に向かって噴射する。
噴射中は、ノズルを円状に細かく動かす。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」
別添 1

〔重要な基本的注意〕

- 使用中に粉末成分に対するアレルギー反応や過敏症が見られた場合は、直ちに使用を中止し、口腔内を十分な水で洗浄し、完全に粉末を除去すること。
- 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 能動型機器接続歯面清掃用機器の取扱説明書に従うこと。
- 歯面に噴射し、歯肉に直接噴射しないこと。
- 本品は目に入らないように注意すること。又、接続されていない状態でも目に向けないこと。万一目に入ったときは、すぐに十分な量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着したときは、直ちに石けんで洗い流すこと。衣類に付着した場合は着替えること。
- グローブと保護メガネを着用して使用すること。肌の露出のない衣類を着用すること。
- 処置前は、ワセリンで患者の唇を保護すること。
- 処置前後は、含嗽剤でうがいすること。
- 飲み込まないよう注意すること。万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲むこと。
- タンクに残った材料はスプーン又は滅菌室のシンクに流して処分し、後に使用しないこと。
- 使用後のボトルは、蓋を固く締め、乾燥した場所で保管すること。高温多湿を避けること。
- 容器の入れ替えをしないこと。
- 使用中は、周囲で飲食や喫煙をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

高温、多湿、直射日光、水漏れを避け保管すること。

〔使用期限〕

ボトル及びスティック裏面に記載のとおり。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp>

製造国：フランス

製造業者：SATELEC