

LM モデラー MH

【形状・構造及び原理等】*

[形状]

把柄部

ES：直径φ13.5mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
モデラー MH LM 708-709		
モデラー MH ミニ LM 707-708		
モデラー MH ダークダイヤモンド LM 708-709DD		
モデラー MH ミニ ダークダイヤモンド LM 707-708DD		

[種類]

モデラー MH LM 708-709 ES、XSi
モデラー MH ミニ LM 707-708 ES、XSi
モデラー MH ダークダイヤモンド LM 708-709DD ES
モデラー MH ミニ ダークダイヤモンド LM 707-708DD ES

【使用目的又は効果】

歯科充填用コンポジットレジンに歯に充填し、仕上げるために用いる。

【使用方法等】

築盛した歯科充填用コンポジットレジンに歯に圧接することにより充填又は形成を行う。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社
電話番号 06-6396-4400
FAX番号 06-6396-4457
ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製造業者 LM-Instruments Oy
製造国 フィンランド