

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

再使用禁止

## ネオリンク バーンアウトマルチ

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

[形状]



ネオリンク バーンアウト マルチ



ネオリンク バーンアウト マルチ, NP

構成品

ネオリンクコーピング

RP用 ストレート モノ



RP用 ストレート マルチ



[成分]

ポリメタクリル酸メチル

[原理]

作業用模型上で本品にワックスアップを行い埋没バーンアウト後、歯科鑄造用金属で鑄造し、最終補綴物を作製する。

### 【使用目的又は効果】

ネオス インプラントの上部構造を作製するために用いる技工用の器材である。

### 【使用方法等】

1. 通法に従い、作業用模型上で本品にワックスアップを行う。  
RP用ストレートモノ・RP用ストレートマルチと併用してもよい。
2. 通法に従い、埋没バーンアウトを行う。
3. 歯科鑄造用合金などを用いて鑄造する。
4. 空気中で冷却した後、通法に従い最終補綴物を作製する。

### 【使用上の注意】

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者 白水貿易株式会社

製造国 スウェーデン

製造業者 Neoss AB

販売業者 株式会社デンタリード

電話番号 06-6396-4448

FAX番号 0120-24-0892

ホームページ <https://www.dentalead.co.jp/>