

機械器具 58 整形用機械器具
ドライバ及び拔出器 11345000
一般医療機器

ネオス レンチアダプター

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



【使用目的又は効果】

インプラント手術時、ラチェット及びインプラントインサータと組み合わせて用い、歯科用インプラントを手動で埋入する。

【使用方法等】

1. 本品をラチェットに装着する。
2. ラチェットを操作し本品を回転させることによりインプラントインサータを回転させ、歯科用インプラントを埋入する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成 26 年 10 月 31 日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保守点検に係る事項】

〔滅菌方法及び滅菌条件〕

本品を再使用する場合は、洗浄後、器具の水分を除去し十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（134℃、4～18 分）すること。尚、滅菌のためのバッグ包装にあたっては、確実に滅菌できるように設定すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製 造 販 売 業 者	白水貿易株式会社
製 造 国	スウェーデン
製 造 業 者	<u>Neoss AB</u>
販 売 業 者	ネオス・ジャパン株式会社
電 話 番 号	03-5289-3511
F A X 番 号	03-5289-3512
ホ ー ム ペ ー ジ	https://www.neoss.co.jp/