

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

## アクセス レプリカ

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔形状〕



#### 〔原理〕

本品は、アクセス アバットメントの接続部と同一の形状を本品の先端に有しており、口腔内のアバットメントの形状を模型上に正確に再現する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、アクセス アバットメントに装着する上部構造を作成するために用いる歯科技工用の器具である。

### 【使用方法等】

#### 〔オープントレー法〕

- スクリュードライバーを使って印象内のアクセス インプレッションコーピングに本品を装着する。
- 印象に石膏を注入・築盛し、作業模型を作製する。

#### 〔クローズドトレー法〕

- 印象内のインプレッションコーピングキャップに本品を装着する。
- 印象に石膏を注入・築盛し、作業模型を作製する。

### 【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。  
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者 白水貿易株式会社  
製造国 スウェーデン  
製造業者 Neoss AB  
販売業者 株式会社デンタリード  
電話番号 06-6396-4448  
FAX 番号 0120-24-0892  
ホームページ <https://www.dentalead.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください