

再使用禁止

インプラントレプリカ

【禁忌・禁止】*
再使用禁止

【形状・構造及び原理】

[形状]



[原理]

本品はアバットメントの接続部と同一の形状を本品の先端に有しており、口腔内のアバットメントの形状を模型上に正確に再現する。

【使用目的又は効果】

本品はアバットメントに装着する上部構造を作成するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

[オープントレー法]

1. スクリュードライバーを使って、印象内のインプレッションコーピングに本品を装着する。
2. 印象に石膏を注入・築盛し、作業用模型を作製する。

[クローズドトレー法]

1. 印象内のインプレッションコーピングキャップに本品を装着する。
2. 印象に石膏を注入・築盛し、作業用模型を作製する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社
製造国 スウェーデン
製造業者 Neoss AB
販売業者 ネオス・ジャパン株式会社
電話番号 03-5289-3511
FAX番号 03-5289-3512
ホームページ <https://www.neoss.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください