


機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

アクセス バーンアウト コーピング

【形状・構造及び原理】

〔形状〕

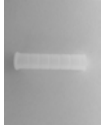

〔成分〕

ポリメタクリル酸メチル

〔原理〕

本品をアバットメントに装着し、意図する形状のワックスパターンを容易に形成できるように補助する。

【使用目的又は効果】

本品は、ネオス インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器材である。

【使用方法等】

1. 本品を作業用模型上のアバットメントに装着する。
2. 必要に応じて、本品を適切な形状に形成し、ワックスを築盛する。
3. 作製したワックスパターンを元にカスタムアバットメントを作製する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

カスタムアバットメントの作製方法については、取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q & A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社
製造国 スウェーデン
製造業者 Neoss AB
販売業者 ネオス・ジャパン株式会社
電話番号 03-5289-3511
FAX 番号 03-5289-3512
ホームページ <https://www.neoss.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください