

歯科材料 09 歯科用研削材料
 歯科用ゴム製研磨材 70903000
 一般医療機器

サン ポリッシャー E Z A

【形状・構造及び原理等】

[形状]

○クリニカル

粗さ：エクストラコース

				
種類	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ (mm)	φ4.4x10.5	φ3.3x7.5	φ6 x 8	φ10
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	10,000	10,000

粗さ：ミディアム

				
種類	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ (mm)	φ4.4x10.5	φ3.3x7.5	φ6 x 8	φ10
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	10,000	10,000

粗さ：ファイン

				
種類	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ (mm)	φ4.4x10.5	φ3.3x7.5	φ6 x 8	φ10
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	6,000	6,000

○テクニカル

粗さ：エクストラコース

		
種類	140104XC	200104XC
サイズ (mm)	φ26 x 2	φ22 x 3.2
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000

			
種類	105104XC	151104XC	177104XC
サイズ (mm)	φ5.5x16	φ11.5x2.4	φ6x15
推奨回転数 (rpm)	15,000	6,000	15,000

粗さ：ミディアム

		
種類	140104M	200104M
サイズ (mm)	φ26 x 2	φ22 x 3.2
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000

			
種類	105104M	151104M	177104M
サイズ (mm)	φ5.5x16	φ11.5x2.4	φ6x15
推奨回転数 (rpm)	15,000	6,000	15,000

粗さ：ファイン

		
種類	140104F	200104F
サイズ (mm)	φ26 x 2	φ22 x 3.2
推奨回転数 (rpm)	6,000	6,000

			
種類	105104F	151104F	177104F
サイズ (mm)	φ5.5x16	φ11.5x2.4	φ6x15
推奨回転数 (rpm)	15,000	6,000	15,000

【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分からなる歯科用研磨材で、歯科補綴物や歯科技工物の研磨に用いる。

【使用方法等】

○クリニカル

1. 本品を歯科用コントラングル等に接続する。
2. 通法に従い、歯科補綴物を研磨する。
3. 使用後は、洗浄しオートクレーブ滅菌を行う。

○テクニカル

1. 本品を歯科技工用ハンドピース等に接続する。
2. 通法に従い、歯科技工物を研磨する。

【使用上の注意】

1. 20,000 (rpm) を超えて使用しないこと。
2. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
 (注意事項の内容例)
 平成26年10月31日事務連絡
 「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】

クリニカルは、付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌(134℃、3分以上)を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：ドイツ

製造業者：SUN Oberflächentechnik GmbH