

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科用ゴム製研磨材 70903000
一般医療機器

サン ポリッシャー T C P

【形状・構造及び原理等】*

〔形状〕

○クリニカル

粗さ : ミディアム

				
種類	103204M SW4Z	126204M SW4Z	143204M SW4Z	144204M SW4Z
サイズ (mm)	φ 4.4 x 10.5	φ 6 x 8	φ 10	φ 10 x 0.8
推奨回転数 (rpm)	8,000	6,000	6,000	6,000

粗さ : エクストラファイン

				
種類	103204XF SW4Z	126204XF SW4Z	143204XF SW4Z	144204XF SW4Z
サイズ (mm)	φ 4.4 x 10.5	φ 6 x 8	φ 10	φ 10 x 0.8
推奨回転数 (rpm)	8,000	6,000	6,000	6,000

シャンク 204-RA



○テクニカル

粗さ : エクストラコース

		
種類	140104XC	541104XC SW4Z
サイズ (mm)	φ 26 x 2	φ 15 x 1
推奨回転数 (rpm)	8,000	8,000

粗さ : ミディアム

				
種類	100104MS W4Z	140104M	158104MS W4Z	541104MS W4Z
サイズ (mm)	φ 5.5 x 18	φ 26 x 2	φ 17 x 2.4	φ 15 x 1
推奨回転数 (rpm)	12,000	8,000	8,000	8,000

粗さ : エクストラファイン

				
種類	100104XF SW4Z	140104XF	158104XF SW4Z	541104XF SW4Z
サイズ (mm)	φ 5.5 x 18	φ 26 x 2	φ 17 x 2.4	φ 15 x 1
推奨回転数 (rpm)	12,000	8,000	8,000	8,000

ブラシ

		
種類	417104GR16	419104GR16
サイズ (mm)	φ 17	φ 19
推奨回転数 (rpm)	12,000	12,000

シャンク 104-HP



【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分からなる歯科用研磨材で、歯科補綴物や歯科技工物の研磨に用いる。

【使用方法等】

○クリニカル

1. 本品を歯科用コントラングル等に接続する。
2. 通法に従い、歯科補綴物を研磨する。
3. 使用後は、洗浄しオートクレーブ滅菌を行う。

○テクニカル

1. 本品を歯科技工用ハンドピース等に接続する。
2. 通法に従い、歯科技工物を研磨する。

【使用上の注意】

1. 20,000 (rpm) を超えて使用しないこと。
2. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)
平成 26 年 10 月 31 日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保守・点検に係る事項】

クリニカルは、付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌 (134℃、3 分以上) を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 : 白水貿易株式会社

電話番号 : 06-6396-4400

FAX 番号 : 06-6396-4457

ホームページ : <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国 : ドイツ

製造業者 : SUN Oberflächentechnik GmbH