

歯科材料 09 歯科用研削材料
 歯科用ゴム製研磨材 70903000
 一般医療機器

サン ポリッシャーMCE

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

粗さ：コース

			
種類	132104C	138104C	155104C
サイズ (mm)	φ 5 x 13	φ 4 x 10.5	φ 15 x 3,5
推奨回転数 (rpm)	15,000	15,000	10,000

		
種類	210104C	239104C
サイズ (mm)	φ 22 x 4,5	φ 22 x 2
推奨回転数 (rpm)	10,000	10,000

粗さ：ミディアム

			
種類	191104M	132104M	133104M
サイズ (mm)	φ 12 x 6,5	φ 5 x 13	φ 6,5 x 13
推奨回転数 (rpm)	10,000	15,000	15,000

			
種類	138104M	151104M	155900M
サイズ (mm)	φ 4 x 10,5	φ 12 x 2,4	φ 15 x 3,5
推奨回転数 (rpm)	15,000	10,000	10,000

			
種類	210900M	213900M	239900M
サイズ (mm)	φ 22 x 4,5	φ 22 x 2,1	φ 22 x 2
推奨回転数 (rpm)	10,000	10,000	10,000

※155900M、210900M、213900M、239900M は、作業部のみの販売を行う場合がある。

シャンク 104-HP



【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分からなる歯科用研磨材で、歯科技工物の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科技工用ハンドピース等に接続する。
2. 通法に従い、歯科技工物を研磨する。

【使用上の注意】

1. 20,000 (rpm) を超えて使用しないこと。
2. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
 （注意事項の内容例）
 平成 26 年 10 月 31 日事務連絡
 「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：ドイツ

製造業者：SUN Oberflächentechnik GmbH