

歯 09 歯科用研削材料
歯磨カップ 16184000
一般医療機器

プロキシオ プロフィーラバーカップ (ショートラッチ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用しないこと。[交叉感染のおそれがある]
- ・許容回転数を超えて使用しないこと。[破折のおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 本体の寸法

φ 6. 25mm (ラバーカップ部分)、全長 16. 55mm

3. 原理

W&H 社製 プロキシオ プロフィーコントラ WP-66W に接続して使用する。
プロフィーコントラ WP-66W を作動させる事により本品が回転し、歯面を研磨・清掃する。

【使用目的又は効果】

歯科予防(清掃)時に用いるゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) プロキシオ プロフィーコントラ WP-66W に本品を取り付ける。
- 2) 本品に歯面研磨剤を適量とる。

2. 使用中の操作

- 1) プロフィーコントラ WP-66W を作動させる。
- 2) 歯面に対し軽く押し当てて研磨・清掃を行う。

3. 使用後の処置

- 1) 余剰歯面研磨剤を拭き取る。
- 2) プロフィーコントラ WP-66W より本品を取り外し、廃棄する。

【使用方法に関する使用上の注意】

1. プロキシオ プロフィーコントラ WP-66W への着脱については、プロキシオ プロフィーコントラ WP-66W の使用方法に従い、完全に装着されている事を確認すること。
2. 使用する前に、口腔外で軸ブレなどの異常がないか確認すること。
3. 歯面に対して無理な力を加えないこと。
4. 許容回転数(1250～2500rpm)内で使用すること。

【使用上の注意】

1. 本品は W&H 社製 プロキシオ プロフィーコントラ WP-66W 専用となっているため、他のストレート・ギアードアングルハンドピースに接続して使用しないこと。
2. 許容回転数を超えて使用しないこと。
3. 本品を使用中に発疹などの過敏症が発生した場合には、ただちに使用を中止すること。
4. 感染予防のため、保護メガネやマスクを使用すること。

5. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要項に関する Q&A について」別添 1

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 保管環境：温度-40-70℃、相対湿度 8-80% (結露なきこと)
2. 気圧、温度、湿度、風、直射日光、ほこり、塩分あるいはイオン等による影響を受けない場所で保管すること。
3. 化学薬品の保管場所や、ガス発生箇所には保管しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社
電話番号 06-6396-4400
FAX 番号 06-6396-4457
ホームページ <http://www.hakusui-trading.co.jp>
製造国 ドイツ
製造業者 Alfred Becht GmbH

取扱説明書を必ずご参照ください