

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科用ゴム製研磨材 70903000
一般医療機器

サン MCP

【形状・構造及び原理等】*

【形状】

粗さ：コース

			
種類	MCP138104C	MCP159104C	MCP219104C
サイズ (mm)	φ 4 x 11	φ 15 x 3.5	φ 22 x 3
推奨回転数 (rpm)	20,000	8,000	8,000

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社
電話番号 06-6396-4400
FAX 番号 06-6396-4457
ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製造業者 SUN Oberflächentechnik GmbH
製造国 ドイツ

粗さ：ミディアム

			
種類	MCP133104M	MCP138104M	MCP151104M
サイズ (mm)	φ 6.5 x 13	φ 4 x 11	φ 12 x 2.5
推奨回転数 (rpm)	15,000	20,000	10,000

	
種類	MCP239104M
サイズ (mm)	φ 22 x 0.8
推奨回転数 (rpm)	8,000

シャンク 104-HP



【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分からなる歯科用研磨材で、歯科修復物の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科技工用ハンドピース等に接続する。
2. 通法に従い、歯科修復物を研磨する。

【使用上の注意】*

1. 下表の回転数を超えて使用しないこと。

MCP138104C	30,000 (rpm)
MCP138104M	
MCP159104C	20,000 (rpm)
MCP219104C	
MCP133104M	
MCP151104M	
MCP239104M	

2. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1