

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科用研磨器材 70907000
一般医療機器

サン ポリッシャー ダイヤモンドペースト

【禁忌・禁止】

本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、ダイヤモンドを含んだ歯科用研磨器材である。

2. 形状及び成分

形状…ペースト状

成分…ダイヤモンド、グリセリン、ワックス

内容量…20 g



3. 原理

ペーストに含まれるダイヤモンド砥粒等により、補綴物の表面を研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本品をブラシ、ディスク等の歯科用研磨器具に適量塗布し、補綴物を研磨する。
2. 研磨後、水洗によりペーストを除去する。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
2. 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止しすぐに医師の診断を受けること。
3. 本品が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
4. 口腔軟組織や皮膚に付着した場合は、綿球等で拭った後、大量の水で洗浄すること。
5. 本品を使用して研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
6. 本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために患者及び術者は保護眼鏡を使用すること。
7. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、高温・直射日光を避け、室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：ドイツ

製造業者：SUN Oberflaechentechnik GmbH