

2005 年 4 月 1 日（新様式第 1 版）

届出番号 34B3X10001000002

医 0 4 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 1 3 7 0 0 0 0 0

白鶴ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥
又は汚染からの器官の保護のため、外
科切開口、他の皮膚創傷又は内部構
造に適用することを目的とする主として
ガーゼから成る器具をいう。

【操作方法又は使用方法】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌がで
きる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しな
いください。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処
理してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない
清潔な場所に保管すること。

【包装】

0.3×10m

【製造販売業者及び

製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 白鶴綿業株式会社
広島県広島市安芸区矢野東
6丁目10番32号
TEL082-888-0101