

2021年7月改定 第2版(新記載要領に基づく改定)
2005年4月1日 第1版

届出番号 34B3X10001000005

医04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

白鶴不織布ガーゼ 25×25cm

再使用禁止

【警告】

- 体内に留置しないこと

【禁忌・禁止】

- 本品は1回使用とする
- 再使用はしないこと

【形状・構造及び原理等】

ビスコース繊維、コットン、ポリエステル繊維又はそれらの複合体からなる不織布。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。
滅菌はEOG滅菌、オートクレーブ滅菌が可能である。

【使用上の注意】

包装が開封、破損もしくは汚損している場合は使用しないで下さい。
本品の使用は一回限りです。再使用はしないで下さい。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【包装】 25×25cm 四つ折り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 白鶴綿業株式会社
広島県広島市安芸区矢野東6丁目10番32号
TEL 082-888-0101