

2005年4月1日（新様式第1版）

届出番号 34B3X10002111113

医04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

地球トンボ印 カット綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる材料をいう。

【操作方法又は使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、E O G滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないで下さい。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【包装】 4cm×4cm100g

【販売名】地球トンボ印カット綿

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

白鶴綿業株式会社

広島市安芸区矢野東6丁目10番32号

TEL. 082-888-0101

【発売元】株式会社大和工場

大阪市淀川区西三国4丁目3番75号

お問い合わせ窓口—TEL06-6392-1731

受付時間／9:00～17:00(月～金※祝日を除く)

※添付文書(A4版)の必要な方は弊社までご連絡下さい。