

\*\*2016年2月(第6版)(新記載要領に基づく改訂)

\*2012年9月(第5版)

届出番号: 23B3X00017000010

医 04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## 医療用カット綿

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

\*\*綿100%の脱脂綿製品。

**【使用目的又は効果】**

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

**【使用方法等】**

・適宜滅菌して使用すること。

\*\*創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

・再滅菌しないこと。

**【使用上の注意】**

・体内に留置しないこと。

・開封後は早めに使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

(保管方法)

\*\*直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

\*\*化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

【製造販売業者】

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口 (TEL) 0568-24-1911