

※2016年2月（第7版）（新記載要領に基づく改訂）

※2012年2月（第6版）

届出番号：23B3X00017000021

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

ク リ ア ー ゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ※※・X線造影糸を直接挟んで使用しないこと。【切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある。】
- ※※・電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

【形状・構造及び原理等】

- ※※・X線を検知できるX線造影糸を織り込んだガーゼ製品。柄（綾紐）の付いている製品と付いていない製品がある。
 - ・綿100%のガーゼ
 - ・柄（綾紐）：綿100%

※※・X線造影糸

ブルー：（固定剤）ポリプロピレン、ポリエステル他（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）深海青グレード02
グリーン：（固定剤）スチレン系エラストマー（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）TET 5MA636 GRN

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線を検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ※※・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。
 - ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ※・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ※※・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ※※・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※※[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911