

※※2016年2月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

※2007年11月（第2版）

届出番号：23B3X00017000033

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

滅菌クリアーゼX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

※※・X線造影糸を直接挟んで使用しないこと。【切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある。】

※※・電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

【形状・構造及び原理等】

※※X線で検知できるX線造影糸を織り込んだガーゼ製品。柄（綾紐）の付いている製品と付いていない製品がある。

本品は、エチレンオキシドガス滅菌を行ったもの。

・綿100%のガーゼ

・柄（綾紐）：綿100%

・X線造影糸

ブルー：（固定剤）ポリプロピレン、ポリエステル他（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）深海青グレード02

グリーン：（固定剤）スチレン系エラストマー（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）TET 5MA636 GRN

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

・適宜使用すること。

・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

※※・体内に留置しないこと。

※※・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

※※・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

※※・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

（有効期間）

※※容器又は包装に記載。【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911