

\*2016年10月(第8版)改訂

\*\*2016年8月(第7版)改訂

届出番号: 23B3X00017000042

医 04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

ツッペル

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

・再使用禁止

- \*\*・X線造影糸を直接挟んで使用しないこと。【切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある。】
- \*\*・電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

**【形状・構造及び原理等】**

①医療脱脂綿+医療ガーゼ

本品は、医療脱脂綿を医療ガーゼで巻き込んだ、または、折りたたんだもの。

②医療脱脂綿+X線造影材入りガーゼ

本品は、医療脱脂綿をX線造影材入りガーゼで巻き込んだ、または、折りたたんだもの。

**【使用目的又は効果】**

- \*\* (エチレンオキシドガス滅菌済み製品)  
本品は、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。
- \*\* (未滅菌製品)  
使用目的に応じて、適宜滅菌して使用すること。

**【使用方法等】**

- \*\* (エチレンオキシドガス滅菌済み製品)
  - ・適宜使用すること。
  - ・再滅菌しないこと
- \*\* (未滅菌製品)
  - ・適宜使用すること。
  - ・使用目的に応じて、適宜滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。
  - ・再滅菌しないこと。

**【使用上の注意】**

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

(保管方法)

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

\* (有効期間)

エチレンオキシドガス滅菌済み製品は、容器又は包装に記載。【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

- \*\* 〒481-0013 愛知県北名古屋市中子四反地 977-2  
問い合わせ窓口 (TEL)0568-24-1911