

※※2016年2月（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

※2014年1月（第3版）

届出番号：23B3X00017000044

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

X線入 ツッペルB

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ※※・X線造影糸を直接挟んで使用しないこと。【切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある。】
- ※※・電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

【形状・構造及び原理等】

- ※本品は、X線で検知可能な成分をガーゼで巻き込んだ製品、又は、折りたたんだ製品や、ガーゼをX線で検知可能な成分を織りこんだガーゼで巻き込んだ製品、又は、折りたたんだ製品がある。

・綿100%のガーゼ

・X線造影糸

ブルー：（固定剤）ポリプロピレン、ポリエステル他（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）深海青グレード02

グリーン：（固定剤）スチレン系エラストマー（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）TET 5MA636 GRN

【使用目的又は効果】

- ※本品は、X線で検知可能な成分を含有し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷に使用する。

【使用方法等】

- ・適宜使用すること。
- ※※・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。
- ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ※※・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ※※・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市中子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911