

**2016年2月(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

*2009年7月(第2版)

届出番号: 23B3X00017000046

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

コメガーゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

**・X線造影糸を直接挟んで使用しないこと。【切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある。】

**・電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

【形状・構造及び原理等】

*本品は、白いガーゼにX線造影糸を織り込んだ製品。

・綿100%のガーゼ

・X線造影糸: (固定剤) ポリプロピレン、ポリエステル (造影剤) 硫酸バリウム (着色剤) 深海青グレード02

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線を検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

**・適宜滅菌して使用すること。

**・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

・体内に留置しないこと。

・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

**・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市長子四反地 977-2

問い合わせ窓口 (TEL) 0568-24-1911