

※※2016年2月（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

※2013年10月（第3版）

届出番号：23B3X00017000074

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

クリンスカットⅢ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

※※電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

【形状・構造及び原理等】

※※綿 100%のガーゼ製品。

【使用目的又は効果】

本品は、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に使用する。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。

※※創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

- ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

※※直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

※※化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911