

※※2016年2月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

※2015年3月（第1版）

届出番号：23B3X00017000080

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

アピオス[®] シンプルガーゼ

再使用禁止

※※【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

※※本品は、レーヨン製の繊維とポリエステル製の繊維を不織布加工し、これをガーゼ状に加工した製品である。

【使用目的又は効果】

本品は不織布から成る被覆・保護材で、創傷又は外科切開口を処置するために使用する。

【使用方法等】

※※・適宜滅菌して使用すること。

※※・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高压蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

※※・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

※※・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

※※・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市中子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911