

※2016 年 2 月（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）

※2014 年 10 月（第 3 版）

届出番号：23B3X00017000082

医 04 整形用品

手術用被覆・保護材 34654000
一般医療機器（※熱傷被覆・保護材 11322101）

ディスポーザブルスクエアパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

※次の素材を積層し、シート状にしたもの。本品は、エチレンオキサイドガス滅菌を行ったもの。

構成部品	原材料
表面材	ポリエチレン
吸収体	レーヨン不織布／高分子吸収体 ＋ パルプ
防水シート	ポリエチレンラミポリプロピレン不織布

【使用目的又は効果】

※本品は、術後創傷又は熱傷皮膚を被覆及び保護し、浸出液を吸収するために使用する適切なサイズの被覆・保護材である。

【使用方法等】

1. 本品を患者へ使用するとき、本品を清潔区域内で使用し、包装外側と接触しないように取り出す。
- ※2. 術後創傷の被覆・保護材、及び、熱傷被覆・保護材、浸出液を吸収するものとして適宜使用する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品を開封後、直ちに使用すること。使用しない場合は再滅菌せず破棄すること。

[その他の注意]

- ・高熱を発する医療機器、火気などと接触させないこと。
- ・使用後は、汚染物の飛散に注意して廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ※・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ※・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

(有効期間)

- ※ 容器又は包装に記載。【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911