

*2021年6月改訂（第2版）

2018年1月（第1版）（新記載要領に基づく作成）

届出番号：23B3X00017000094

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

ガーゼスポンジTX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸を直接挟んで使用しないこと。【切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある。】
- ・電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

【形状・構造及び原理等】

本品は、X線を検知可能な成分を織りこんだガーゼを重ね合わせて縫製した製品。本品には柄（綾紐）の付いた製品と付いていない製品がある。

- ・綿100%のガーゼ
- ・柄（綾紐）：綿100%

*・縫製糸：綿100%、ポリエステル

- ・X線造影糸：
ブルー：（固定剤）ポリプロピレン、ポリエステル他（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）深海青グレード02

【使用目的又は効果】

本品は、X線を検知可能な成分を含有し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷に使用する。

【使用方法等】

- ・適宜使用すること。
- ・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。
- ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911