

*2017年10月改訂(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

2005年11月15日作成(第1版)

届出番号 40B3X10001000001

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

医療ガーゼ

再使用禁止

【警告】

- *術後に枚数を確認することや術式に応じて使用するガーゼの種類・準備枚数(最小単位)を決めておくなど体内に遺残させないよう対策をとること

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- *電気メス等を近づけないこと
(引火するおそれがある)

【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ製品
包装:パッケージに入数を記載。

【*使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【*使用方法等】

使用目的に応じて適宜使用して下さい。
目的に応じて滅菌して下さい。
滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EO G滅菌を使用して下さい。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【*保管方法及び有効期間等】

*直射日光、水漏れ、火気及び高温・多湿を避け清潔な場所に保管してください。

【*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 林衛材
〒812-0053福岡県福岡市東区箱崎1丁目20番19号
お問い合わせ先 092-651-2647
※添付文書(A4版)の必要な方は弊社までご連絡ください。