


類別 医療用品 6 視力表及び色盲検査表
一般的名称 視力表 コード No1. 6800000
一般医療機器（クラス I）
販売名 近点検査表

【形状、構造及び原理】

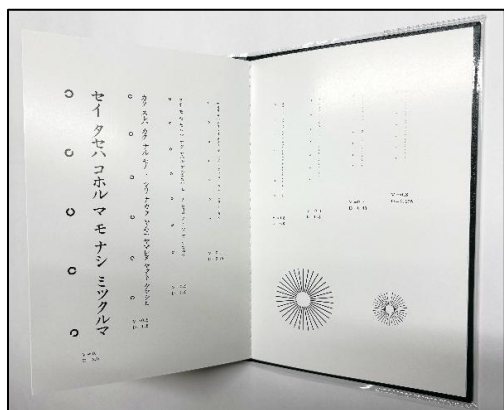

万国式近点検査表（近距離式視力表）
【石原氏片仮名近点表】

寸法：約 140mm×210mm

原料：厚紙

視標：1.5、1.2、1.0、0.9、0.8、0.7、0.6、0.5、0.4、0.3、0.2、0.1

厚紙に印刷した視標（片仮名、環状視標、放射線図）を冊子形式にまとめた視力表。被検者が指定された視標を答えることによって視力を測定する。

【使用目的又は効果】

視力検査に用いる。

【使用方法】

- （1） 直射日光の当たらない明室で影の出来ない場所で検査をすること。
- （2） 照明は視標周辺の背地の光束発散度が 500rlx 程度となるようにする。
- （3） 被検者と視力表間の距離を 30cm とり、視力表の意味と見方を説明し、検査を始める。
- （4） 被検者に視標を読ませる。

【使用上の注意】

- （1） 視標面に傷、汚れ等つけない様に使用して下さい。
- （2） 本器及び患者に異常があった場合は使用を中止し、適切に処置してください。

【保管方法及び有効期間】



- （1） 直射日光に当たらない場所に常温、常湿で保管すること。
- （2） 使用期間は 5 年を目途とし、視標面に傷、汚れ、焼け等が出た場合は交換してください。

【保守・点検に係る事項】

- （1） 使用後、溶剤などで拭かないこと。視標面にはあまり触れないことが望ましい。
- （2） 表面に傷をつけない様に気を付けて取り扱うこと。
- （3） 本器が傷、汚れ、焼け等が出た場合は、使用期間の 5 年を待たずに交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

氏名 株式会社 半田屋商店
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-4
電話 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

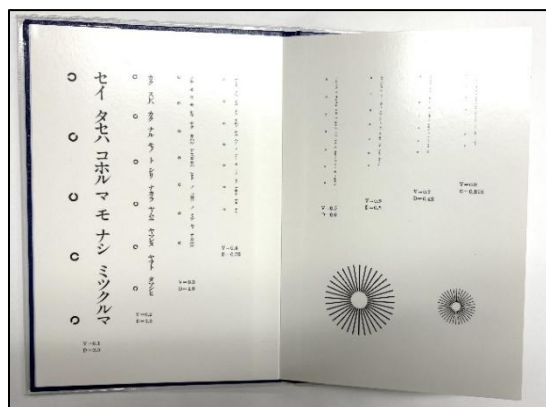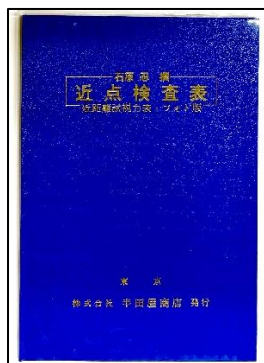

近点検査表 近距離視力表・フォト版
【石原氏近点視力表フィルム版】