

\*\* 2017年9月改訂(第6版 新記載要領に基づく改訂、他)

\* 2015年7月改訂(第5版)

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
高度管理医療機器 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル (70320100)

## メドコンプブラッドアクセス用カテーテル

(インジェクションキャップ)

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品はカテーテルを使用しない時にカテーテルのコネクタに栓をするキャップで、カテーテルの内容液が漏れないようにする。また、キャップを通して薬剤の注入を行うことができる。

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

・構成内容


インジェクションキャップ

- ① 雄型ルアーロック : ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体) (\*)
- ② 栓 : イソブレンゴム

◎インジェクションキャップ

カタログ番号	説明
MC50	雄型ルアーロック仕様

外観図

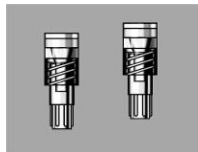

インジェクションキャップ

### 【使用目的又は効果】(\*\*)

本品は血液透析の際に使用されるブラッドアクセス用のカテーテルである。

### 【使用方法等】(\*\*)

ルアーロック仕様のコネクタにネジ込みで確実に締めて下さい。

#### 注意

- ・ 締める時は過剰な力で締め過ぎないで下さい。カテーテルやインジェクションキャップが損傷したり破損する事があります。
- ・ キャップ後は確実に締まって、液漏れ等がないことを毎回確認して下さい。
- ・ 本品をカテーテルのコネクタに締めたり、取り外す時は鉗子、ペンチ等の工具を使用しないで下さい。
- ・ 本品を使用する場合はキャップするカテーテルの取扱説明書、添付文書をよく読んで下さい。

### 【使用上の注意】

1. 使用注意(\*\*)  
本品または、本品の素材に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないで下さい。
2. 重要な基本的注意  
(1) 本品は使用の直前に包装から取り出して下さい。  
(2) 本品の使用中は本品及び患者に異常がないことを絶えず監視すること。  
(3) 本品の使用中に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で外す等の適切な処置を講ずること。

### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

1. 保管方法  
室温下で水濡れに注意し、直射日光を及び高温多湿を避けて保管して下さい。
2. 有効期間  
使用期限は包装の法定表示ラベルに(\*\*)記載してあります。  
(自己認証による)(\*\*)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者

株式会社 **林寺メディノール**

電話番号: 076-222-6531

外国製造所

メドコンプ アイエヌシー  
(MedComp, Inc)  
アメリカ合衆国