

**2017年9月改訂(第5版 新記載要領に基づく改訂)

*2009年6月改訂(第4版)

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
 高度管理医療機器 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル (70320100)

メドコンプブラッドアクセス用カテーテル (ガイドワイヤー J型)

再使用禁止

【警告】

1. ガイドワイヤーの挿入中に異常な抵抗を感じたらガイドワイヤーをそれ以上進めないこと。
2. イントロデューサーニードルにガイドワイヤーを無理に挿入したり抜き取らないこと。[ワイヤーが切断・破損することがある。]
3. ガイドワイヤーが破損した場合は、カテーテルとガイドワイヤーを同時に抜き取らなければならない。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 内頸静脈や鎖骨下静脈で使用する場合はガイドワイヤーを右心房、右心室に深く挿入しないこと。[心タンポナーデを発生させる恐れがある。]
3. 鎖骨下静脈に挿入を試みた場合は無理にガイドワイヤーの挿入作業を進めないこと。[ガイドワイヤーが内頸静脈へ迷入する恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

本品はカテーテルの位置調整及び移動に使用する。
 本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

構成内容	数量
ガイドワイヤー (ステンレススチール)	1本

◎ガイドワイヤー J型

カタログ番号	説明	径	長さ
MC35J	ガイドワイヤー J型	0.035"	70cm
MC38J	ガイドワイヤー J型	0.038"	70cm
MC35-JM	マーク付ガイドワイヤー J型	0.035"	70cm
MC38-JM	マーク付ガイドワイヤー J型	0.038"	70cm

外観図



ガイドワイヤー J型

【使用目的、又は効果】 (**)

本品は血液透析の際に使用されるブラッドアクセス用のカテーテルである。
 (*)

【使用方法等】 (**)

本品の使用に当たっては、挿入するカテーテルの添付文書を読んで使用して下さい。

【使用上の注意】

1. 使用注意 (**)
 本品または、本品の素材に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないで下さい。
2. 重要な基本的注意
 1) 本品を使用中は本品及び患者に異常がないことを絶えず監視すること。
 2) 本品の使用中に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で外す等の適切な処置を講ずること。

【保管方法及び有効期間等】 (**)

1. 保管方法
 室温下で水濡れに注意し、直射日光を及び高温多湿を避けて保管して下さい。
2. 有効期間
 包装の法定表示ラベルに使用期限を記載してあります。
 (自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (**)

製造販売業者

 株式会社 **林 寺メディノール**

電話番号: 076-222-6531

外国製造所

メドコンプ アイエヌシー
 (MedComp, Inc.)
 アメリカ合衆国