

** 2023年6月改訂(第4版)

* 2017年10月改訂(第3版 新記載要領に基づく改訂、他)

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル (70320100)

メドコンプブラッドアクセス用カテーテル

(スタットロック(カテーテル固定具))

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はカテーテルのアダプターを固定するための、固定具付き粘着絆です。
本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みです。

構成内容

- スタットロック
- ①接着用パッド セルフフォーム
 - ②裏紙 フィルム
 - ③スナップ ポリカーボネート

◎スタットロック

カタログ番号	説明
MCSL	カテーテル固定具

外観図



スタットロック

【使用目的、又は効果】(*)

本品は血液透析の際に使用されるブラッドアクセス用のカテーテルである。

【使用方法等】(*)

1. カテーテルのアダプターの保持位置を決めます。
2. 保持位置に合わせ、スタットロックを貼付する部位を付属のスワブで拭き、乾燥させます。
3. スタットロックにカテーテルの赤と青のアダプターを取り付けます。
4. 粘着絆の粘着面の紙をはがし、皮膚に貼付します。

【注意】

- ・貼付後は本品及び患者に異常がないことを絶えず監視して下さい。
- ・貼付後、7日以内に交換して下さい。

【使用上の注意】

1. 使用注意(*)
本品または、本品の素材に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないで下さい。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 本品の使用中は本品及び患者に異常がないことを絶えず監視すること。
 - 2) 本品の使用中に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で外す等の適切な処置を講ずること。

【保管方法及び有効期間等】(*)

1. 保管方法
室温下で水濡れに注意し、直射日光を及び高温多湿を避けて保管して下さい。
2. 有効期間
使用期限は包装の法定表示ラベルに(*)記載してあります。
(自己認証による)(*)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者

 株式会社 **林寺メディノール**

電話番号 : 076-222-6531

外国製造業者(**)

メドコンプ アイエヌシー
(MedComp, Inc)
アメリカ合衆国